

**C**ette chronique propose des textes d'information générale que vous pouvez reprendre à loisir dans vos publications, par exemple, le journal de votre établissement. Vous n'avez qu'à mentionner la source : Objectif prévention, vol. 19, n° 2.

**V**ous pouvez utiliser le texte en entier ou seulement des sections. Aucune autorisation n'est requise. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus pour améliorer cette nouvelle chronique.

## LE LÈVE-PERSONNE

### Il existe deux types de lève-personne :

- ▶ le lève-personne mobile au sol (LPMS) : modèle régulier (électrique ou manuel) et déambulateur (électrique ou manuel) ;
- ▶ le lève-personne sur rail au plafond (LPSRP) : fixe ou portatif.

Le lève-personne est un des équipements qui peut aider à diminuer les maux de dos occasionnés par le déplacement des patients. Mais jusqu'à quel point en connaissez-vous les règles d'utilisation sécuritaire?

### Répondez vrai ou faux aux énoncés suivants

#### Utilisation du lève-personne

1. Le poids du bénéficiaire est le seul critère à considérer pour recommander l'utilisation du lève-personne. .... (V) (F)
2. Pour déplacer un patient, s'il n'est pas possible de le glisser, de le rouler ou de le faire pivoter, l'utilisation du lève-personne est indiquée. .... (V) (F)

Illustration Jacques Goldstyn



3. Il ne faut pas soulever manuellement un bénéficiaire même si le transfert est effectué par deux personnes. .... (V) (F)
4. Le lève-personne ne doit pas être utilisé en réadaptation compte tenu de l'objectif d'autonomie du bénéficiaire. .... (V) (F)
5. L'installation d'un LPSRP est la solution la plus avantageuse dans un espace restreint. .... (V) (F)
6. Le personnel doit soulever à bout de bras le moteur du LPSRP portatif pour le fixer au rail. .... (V) (F)
7. Sur une unité de 32 bénéficiaires en perte d'autonomie importante, un seul LPMS suffit. .... (V) (F)
8. Le LPSRP fixe est toujours disponible dans la pièce où il est installé. .... (V) (F)
9. Le LPMS doit toujours être rangé au sous-sol après chaque utilisation. .... (V) (F)

#### Toiles

10. La toile à double cuissarde peut être installée sous un bénéficiaire assis, sans qu'il soit nécessaire de le soulever. .... (V) (F)
11. L'installation de la toile est grandement facilitée lorsqu'elle est réalisée par deux soignants. .... (V) (F)

12. Les toiles doivent être vérifiées une fois par année, avant les vacances d'été, afin d'y détecter toute défaillance. .... (V) (F)
13. Toute toile présentant une faiblesse dans le tissu doit être immédiatement remplacée. .... (V) (F)

#### Roues et freins

14. L'accumulation de poussière, de charpie et de cheveux sur les roues du LPMS ne nuit pas au roulement. .... (V) (F)
15. Les roues du LPMS doivent être munies de freins. .... (V) (F)

#### Les bénéficiaires

16. La crainte du bénéficiaire d'être suspendu dans le vide ne diminue pas avec l'habitude. .... (V) (F)
17. Le LPSRP facilite la tâche des soignants, ce qui donne l'impression au patient d'être moins à la charge d'autrui. .... (V) (F)
18. En cours de transfert, les travailleurs doivent rester à proximité du bénéficiaire, ce qui contribue à le sécuriser. .... (V) (F)

#### Les tâches

19. Il est sécuritaire que les travailleurs qui ont une plus grande force soulèvent les bénéficiaires manuellement. .... (V) (F)
20. Le personnel doit signaler toute défec-tuosité ou mauvais fonctionnement du lève-personne. .... (V) (F)
21. L'ASSTSAS préconise l'utilisation d'un lève-personne électrique afin de diminuer les contraintes aux membres supérieurs. .... (V) (F)

Vérifiez vos réponses au bas de la page. Si vous avez plusieurs mauvaises réponses, vous auriez certainement avantage à vous procurer les documents de l'ASSTSAS. D'ici là, appliquez bien les quelques règles d'utilisation qui suivent.

1 (F) - 2 (V) - 3 (V) - 4 (V) - 5 (V) - 6 (F) - 7 (F) - 8 (V) - 9 (F) - 10 (V) - 11 (V) - 12 (V) - 13 (V) - 14 (F) - 15 (V) - 16 (F) - 17 (V) - 18 (V) - 19 (F) - 20 (V) - 21 (V)

**RÉPONSES AU TEST**

### RÈGLES D'UTILISATION

- ▶ Le lève-personne est requis lorsqu'il n'est pas possible de rouler, glisser ou pivoter le patient, peu importe son poids.
- ▶ Les patients transférés en lève-personne sont en perte d'autonomie, c'est pourquoi l'installation de la toile est grandement facilitée lorsqu'elle est réalisée par deux soignants.
- ▶ Lorsqu'un patient est installé dans le LPMS, la base du lève-personne doit être élargie.
- ▶ Vérifier le lève-personne et les toiles avant l'utilisation.
- ▶ Afin d'éviter le basculement du LPMS, ne pas pousser ou tirer sur le mât de charge ou sur le bénéficiaire pour pivoter le lève-personne.
- ▶ Utiliser les toiles appropriées aux dimensions et aux caractéristiques du bénéficiaire.
- ▶ Lorsque l'espace le permet, l'application du frein sur une roue facilite le pivotement du LPMS.

**NOTE : LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES DANS CETTE CHRONIQUE SONT EXTRAITES ET ADAPTÉES DES DOCUMENTS SUIVANTS QUE VOUS POUVEZ VOUS PROCURER À L'ASSTSAS :**

**PRÉVENTION DES BLESSURES MUSCULO-SQUELETTIQUES POUR LE PERSONNEL SOIGNANT, GUIDE DE RÉFÉRENCE, 313 PAGES, 1995. (GP37) 15 \$.**

**LE LÈVE-PERSONNE, UN OUTIL DE TRAVAIL, VIDÉO VHS, 9 MINUTES, 1995, DISPONIBLE EN FRANÇAIS ET ANGLAIS. (V12) 25 \$.**

**PERSONNEL SOIGNANT, DOSEZ VOS EFFORTS, BROCHURE ACTION PRÉVENTION, 32 PAGES, 1995. (B3) 1,50 \$ À 0,90 \$ L'UNITÉ, SELON LES QUANTITÉS.**